

Guida introduttiva
alla
ScanBox



DENTAL
MONITORING[®]
by DentalMind

Fantastico!

Sei pronto per iniziare il tuo percorso con Dental Monitoring. La ScanBox è stata ideata per semplificarti la vita!

Davanti

Tasto di regolazione

Freccia blu

Supporto per smartphone

Fascia di supporto

Attacchi magnetici

Indicatore per allineare l'obiettivo della fotocamera

Dietro

Apribocca
Dental Monitoring

Inserti metallici

Come si esegue una scansione con la ScanBox?

I video tutorial sono disponibili anche all'interno dell'applicazione.




1 Posizionati di fronte ad uno specchio e apri l'applicazione Dental Monitoring. Assicurati che il telefono non sia in modalità silenziosa. Alza il volume del telefono.

Togli gli allineatori.



2 Inserisci il tuo smartphone nella ScanBox (senza la cover), posizionandolo nell'angolo in basso a sinistra in corrispondenza della freccia blu. Assicurati che la fotocamera posteriore sia rivolta verso il retro della ScanBox e utilizza il tasto di regolazione per allineare la fotocamera con l'indicatore per obiettivo della ScanBox.

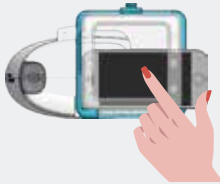

5 Per avviare la scansione, tocca due volte lo schermo dello smartphone e segui le istruzioni vocali dell'applicazione.



6 Non appena senti il suono della fotocamera, avvia la scansione spostando la ScanBox alla stessa velocità dell'indicatore sullo schermo dello smartphone. Tieni ferma la testa.



Bocca chiusa



Bocca leggermente aperta (spazio di un dito)

9 Durante la scansione potrebbero esserti richieste queste posizioni.



10 Ora puoi rimuovere la ScanBox. Per farlo, tieni fermo l'apribocca con i pollici e solleva la ScanBox. A questo punto, rimuovi anche l'apribocca.




3 Tutte le scansioni devono essere realizzate con l'aiuto dell'apribocca Dental Monitoring. Inseriscilo con l'arco rivolta verso il basso, prima da una parte e poi dall'altra.



4 Collega la ScanBox all'apribocca. L'aggancio corretto sarà indicato da un "clac".



7 Esegui un movimento ampio, da un orecchio all'altro, per garantire la scansione di tutti i denti.

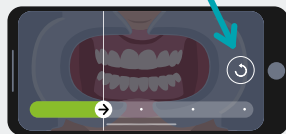

8 Se necessario, puoi ricominciare la scansione da capo premendo il pulsante "Riprova".



11 **Rimettiti gli allineatori** e realizza un'altra scansione ripartendo dal **punto 3**. Tieni la bocca leggermente aperta.

Fantastico! Hai completato la tua prima scansione in autonomia!

La scansione sarà inviata automaticamente alla cartella clinica del tuo dentista. Non devi fare nient'altro.

Non ti resta che goderti il tempo libero e attendere la prossima notifica sull'applicazione da parte del tuo dentista.

Domande frequenti

Quando potrò eseguire la mia prima scansione con il dispositivo di Dental Monitoring in autonomia?

Riceverai una notifica dal tuo dentista direttamente sull'applicazione.

Con quale frequenza devo eseguire le scansioni?

La frequenza delle scansioni sarà stabilita dal tuo dentista, in base al tuo trattamento. Se necessario, il dentista può richiedere una scansione al di fuori dell'intervallo stabilito.

Come faccio a sapere quand'è il momento di eseguire una nuova scansione?

Quando è necessaria una nuova scansione, riceverai una notifica direttamente sull'applicazione. A questo punto ti basterà selezionare "Esegui una scansione".

Cosa succede se la mia scansione viene rifiutata?

Non preoccuparti, può succedere che la tua scansione venga rifiutata. Ti verrà spiegato il perché e riceverai dei consigli su come eseguire correttamente la prossima scansione!

Cosa devo fare nel caso in cui sia necessario un aggiornamento dell'applicazione?

Noi di Dental Monitoring ci impegniamo nel costante miglioramento della nostra applicazione. Il più delle volte, non dovrai fare nulla e l'applicazione si aggiornerà in automatico. Nel caso in cui dovessimo rilasciare un aggiornamento molto complesso, verrai informato via e-mail.

Posso utilizzare un altro apribocca?

No, la ScanBox deve essere utilizzata esclusivamente con l'apribocca di Dental Monitoring. Tutti gli altri apribocca non sono compatibili.



DENTAL MONITORING[®]

by DentalMind

Chiedi subito informazioni su Dental Monitoring al tuo dentista!

L'applicazione di Dental Monitoring è disponibile su App Store e Google Play.



**Il nostro servizio clienti è sempre a tua completa
disposizione:**

E-mail : support@dental-monitoring.com

Numero di telefono: + 33 (0) 1 86 95 01 01

dental-monitoring.com

Dental Monitoring è una soluzione a distanza per i trattamenti odontoiatrici e ortodontici, progettata e realizzata da Dental Monitoring. Dental Monitoring offre soluzioni che possono essere utilizzate esclusivamente da professionisti della salute dentale registrati in Dental Monitoring e dai loro pazienti in trattamento. Il prodotto è ideato per aiutare i professionisti della salute dentale nel monitoraggio di trattamenti ortodontici quali allineatori, apparecchi ortodontici, apparecchi di contenzione e altri tipi di trattamenti molto comuni. Prima di utilizzare il prodotto, consultare il proprio dentista e le istruzioni per l'uso. La disponibilità e le concessioni relative ai prodotti possono variare da un paese all'altro, in base alle normative locali. Contatta il tuo rappresentante locale per maggiori informazioni.